

MASQUE CHIRURGICAL A ELASTIQUES

Blanc/Bleu


YOUNA
INTERNATIONAL MEDICAL SOLUTIONS


REFERENCE N° A203/ A306

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT L'ENTREPRISE

Nom	YOUNA International Medical Solutions
Adresse complète	Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE
Téléphone	+41 22 252 41 20
Site Internet	www.youna-ims.com

INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT

Dénomination commune	Masque chirurgical Type II à usage unique
Dénomination commerciale	Masque chirurgical à élastique Blanc/Bleu
Code nomenclature Cladimed	N/A
Code LPPR* (ex TIPS si applicable)	N/A
Classe du DM	Classe I
Directive de l'UE applicable	93/42/EEC en incluant la directive 2007/47/CE
Selon Annexe n°	N/A
Numéro de l'organisme notifié	AUTO
Descriptif du dispositif	Masque médical à usage unique couvrant la bouche, le nez, le menton. Assurant une barrière qui limite la transmission d'agent infectieux entre le personnel et le patient. Type II à fixation auriculaires élastiques.

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Matériel : 100% Polypropylène • Couleur : Blanc/Bleu • Poids : 25g/m² (+/-2g/m²) • Taille : 175 x 95 mm (+/-5mm) • Efficacité de filtration bactérienne et virale : EFB \geq 98% • Matériaux doux, hypoallergénique, sans fibre de verre • Assemblage par soudure ultrasonique • Extrêmement léger et confortable
------------------	---

Conditionnement / emballages

Référence	UCD Unité de Commande	CDT Multiple de l'UCD	QML Quantité mini de livraison
A302 (Blanc) A303 (Bleu)	Paquet de 50 unités	1 carton = 60 paquets de 50 unités	1 carton de 3'000 unités

Principaux composants et matériaux	<ul style="list-style-type: none"> • Trois couches 100% Polypropylène • Élastique de fixation en caoutchouc • Barette nasale : métallique et recouverte de plastique
------------------------------------	---

Présence de latex	Non
-------------------	-----

Présence de produits d'origine animale ou biologique	Non
--	-----

Domaine et indication	<ul style="list-style-type: none"> • Destiné à éviter lors de l'expiration de celui qui le porte, la projection de sécrétion des voies aériennes supérieures ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles par voie de gouttelettes (transmissions par des gouttelettes de salive ou de sécrétions des voies aériennes supérieures), ou par voie aérienne (transmission aéroportée par de fines particules de moins de 5 microns). • Utilisé dans les établissements de santé et les lieux publics dans les cas d'infection ou d'épidémies.
-----------------------	--

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions de conservation et de stockage	À conserver dans un environnement sec et à température ambiante
Précautions particulières	Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abimé.
Durée de validité du produit	5 ans

CONSEILS D'UTILISATION

Performance	Équipement à usage unique, protection hygiène
Contre-indications	Les personnes allergiques à l'un des composants du produit
Péremption	Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage

MODE D'EMPLOI

- 1 Avant toute utilisation de masque, se laver les mains avec de l'eau et du savon ou à l'aide d'une solution hydro alcoolique. Respectez le sens d'utilisation du masque : la barrette nasale doit être orientée vers le haut et l'inscription «O'BLOC» doit être lisible de l'extérieur.
- 2 Attraper le masque par les boucles élastiques et positionner les boucles élastiques autour des oreilles en veillant à recouvrir le nez et la bouche avec le masque.
- 3 Tirer le masque en saisissant les parties supérieure et inférieure afin de déplier entièrement le plissé du masque chirurgical (cela permet entre autres de réduire au maximum le nombre de couches au travers desquelles respirer).
- 4 Former la barrette nasale avec les doigts afin de réduire le passage d'air.
- 5 Veiller à ajuster au mieux le masque sur votre visage, il doit être appliqué du haut du nez au-dessous du menton.
- 6 Pour retirer le masque, l'enlever par les boucles élastiques. Le jeter immédiatement puis se laver les mains avec de l'eau et du savon ou à l'aide d'une solution hydro alcoolique

NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.