

# COLLECTEUR DE DECHETS MEDICAUX DISPO 2L – JAUNE/ROUGE



## RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT L'ENTREPRISE

Nom	YOUNA International Medical Solutions
Adresse complète	Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE
Téléphone	+41 22 252 41 20
Site Internet	www.youna-ims.com

REFERENCE N° YSCDY020

## INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT

Dénomination commune	Collecteur de déchets médicaux
Dénomination commerciale	Collecteur de déchets médicaux 2L
Code nomenclature Cladimed	N/A
Code LPPR* (ex TIPS si applicable)	N/A
Selon Annexe n°	N/A
Descriptif du dispositif	Collecteur à usage unique pour l'élimination d'objets piquants, coupants et tranchants. Modèle conçu pour les services à faible production de déchets (plateau de soins, chariots, cabinet médical, au domicile du patient...)

### Caractéristiques

- Matériel : Polypropylène
- Fermeture : Couvercle avec hublot
- Couleur : Corps jaune, couvercle rouge
- Dimensions extérieures : 140x212 mm H (couvercle monté et fermé)
- Forme : Cylindrique
- Poids : 140gr
- Masse brute maximale : 1,000gr
- Capacité nominale : 2,000Lt
- EN ISO : 23907-1 :2019 – Kite Mark



### Conditionnement / emballages

Référence	UCD Unité de Commande	CDT Multiple de l'UCD	QML Quantité mini de livraison
	Carton de 80 pièces	1 palette = 1920 pièces	1 palette par article

Principaux composants et matériaux Polypropylène

Présence de latex Non

Présence de produits d'origine animale ou biologique Non

Domaine et indication Le collecteur de déchets est devenu une priorité incontournable dans le domaine de la santé. Chaque jour, les établissements de soins génèrent une quantité considérable de déchets qui nécessite une gestion appropriée pour éviter les risques sanitaires et préserver l'environnement.

## CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions de conservation et de stock À conserver dans un environnement sec et à température ambiante

Précautions particulières Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abîmé.

Durée de validité du produit 5 ans

## CONSEIL D'UTILISATION

Performance	Equipement à usage unique, protection et hygiène
Contre-indication	Les personnes allergiques à l'une des composantes du produit
Péremption	Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage

## MODE D'EMPLOI

### Montage du couvercle

Lever le petit couvercle ovale du couvercle principal  
Et positionner l'ouverture en correspondance du marquage



Appuyer fortement autour du couvercle avec la paume des mains.  
Des clics se feront entendre à chaque pression et confirmeront la fermeture du Couvercle.



### Fermeture provisoire

Le collecteur peut être fermé provisoirement  
En abaissant le couvercle ovale jusqu'à bloquer la languette  
Sur le bord de l'ouverture.



A ce stade, la réouverture est possible

### Fermeture définitive

Du couvercle en position de fermeture provisoire, appuyer fortement  
Avec 2 doigts sur le symbole « Push » central jusqu'au « clic »  
Ensuite appuyer sur les 2 « push » latéraux jusqu'à entendre les « clics »  
De fermeture définitive. La languette se trouvera en position verticale.



A ce stade, la fermeture est définitive

## UTILISATION

- Pendant l'utilisation, ouvrir le couvercle en le bloquant avec le crochet prévu à cet effet. Et le refermer en fermeture provisoire entre chaque utilisation.
- Quand le niveau maximum de remplissage est atteint, fermer la boîte définitivement selon les instructions ci-dessus.
- Orifice pour l'introduction de déchets : Orifice de grande taille permettant l'introduction entre autres, des cloches à hémocultures, épicroaniennes, bistouris, etc...
- Elimination : A la fin du cycle de vie, les boîtes sont éliminées sans émission de gaz nocifs ni dépôts de métaux lourds.

### NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.